

Nur für den zahnmedizinischen Gebrauch bestimmt.

# CE Impression Compound

**Kerr**

Termoplastische Abdruckmass

D

## Gebrauchsanleitung

Kerr Impression Compound sind in Platten und Stangen erhältlich. Die verschiedenen Farben stehen für die Erweichungstemperatur des jeweiligen Abformmaterials:

Hellgrün	Verarbeitungstemperatur 50-51°C
Grau	Verarbeitungstemperatur 53-54°C
Rot	Verarbeitungstemperatur 55-56°C

### Gebrauchsanleitung

Kerr Impression Compound in klarem Wasser im oben angegebenen Temperaturbereich gründlich erweichen lassen. Die Masse mit warmen, nassen Fingern durchkneten, bis sie vollkommen gleichmäßig aufgeweicht ist.

- Das Abformmaterial in einen passenden Abformlöffel geben und die Oberfläche abflammen.
- Vor dem Einsetzen in den Mund in heisses Wasser eintauchen.
- Die Aushärtung läßt sich durch kaltes Wasser oder kalte Luft beschleunigen.
- Die Arbeitstemperaturen für Platten und Stangen liegen im gleichen Bereich wie oben angegeben.
- Stangen lassen sich über einer Flamme in knetbaren Zustand bringen.

### LAGERUNG

Bei Raumtemperatur lagern (10-25°C).